

Digitální aktivace

Průvodce aplikací
FreeStyle LibreLink



K dispozici pro
IOS + ANDROID




FreeStyle
LibreLink


life. to the fullest.®
Abbott

IOS

Obsah

- 2 Ověření kompatibility
- 3 Identifikace modelu telefonu a operačního systému
- 4 Stáhněte si a nainstalujte aplikaci
- 6 Nastavení telefonu
- 11 Vytvoření účtu a přihlášení
- 12 Kontakt na oddělení péče o zákazníky FreeStyle

Ověření kompatibility

Pokyny pro ověření kompatibility telefonu a operačního systému (OS) a podrobný průvodce ke stažení aplikace FreeStyle LibreLink.

Ověřte si kompatibilitu telefonu a operačního systému

Oblíbená mobilní zařízení a operační systémy (OS) jsou pravidelně testovány, aby se vyhodnotila kvalita propojení přes NFC a Bluetooth a kompatibilita aplikací se snímači. Před instalací nové verze operačního systému do telefonu nebo před použitím aplikace s novým telefonem doporučujeme zkontrolovat průvodce kompatibilitou mobilních zařízení a operačních systémů.

Více informací o aplikaci a instruktážní video najdete na freestylelibre.cz/produkty/freestyle-librelink

Pro rychlý přístup na webovou stránku naskenujte QR kód:




Průvodce kompatibilitou chytrých telefonů:

Identifikace modelu telefonu a operačního systému


1 Klepněte na **Nastavení**




2 Klepněte na **Obecné**

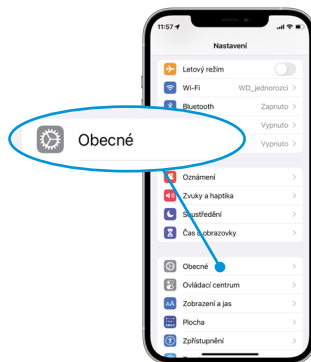

3 Klepněte na **Informace**

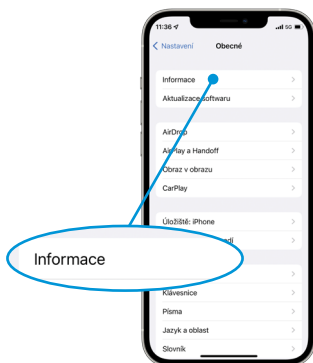

4 Najděte **Verze softwaru** a **Číslo modelu**

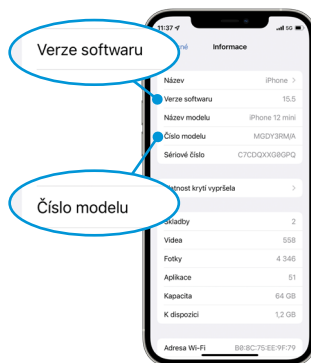

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci

Aplikace FreeStyle LibreLink je k dispozici v obchodě App Store





1 Klepněte na ikonu **App Store** na domovské obrazovce

Pokud nejste přihlášení pomocí Apple ID, budete vyzváni, abyste:


- zadali Apple ID
- zadali heslo a klepli na **Přihlásit**





2 Do vyhledávacího řádku zadejte **FreeStyle LibreLink** a klepněte na **Hledat**

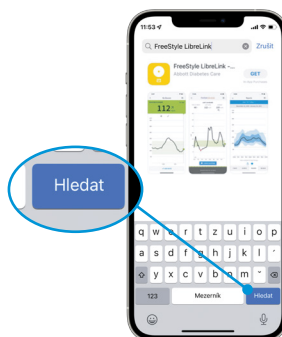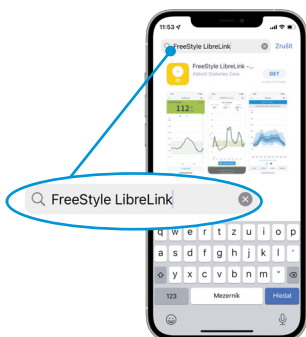

- 3 Vyhledejte ikonu FreeStyle LibreLink
a klepnutím na ikonu **Získat** zahájíte stahování

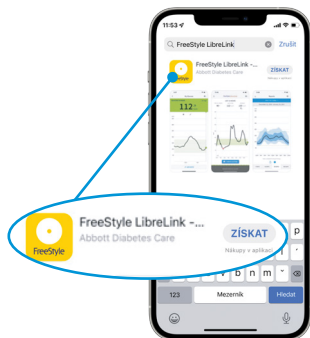

- 4 Klepněte na **Otevřít**
Ikona aplikace se zobrazí na domovské obrazovce

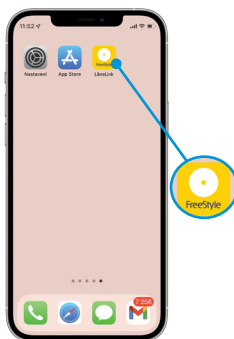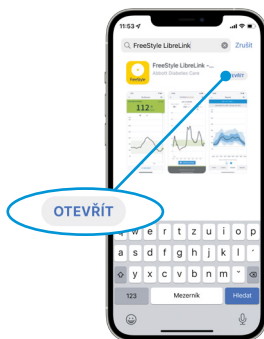


Nastavení telefonu

Pokud používáte možnost **Čas u obrazovky**, nepamenejte přidat aplikaci FreeStyle LibreLink do seznamu **Povoleno vždy**.


1 Klepněte na **Nastavení**




2 Klepněte na **Čas u obrazovky**

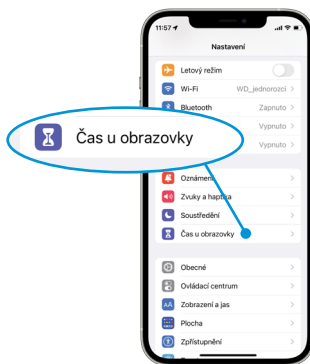

3 Klepněte na **Povoleno vždy**

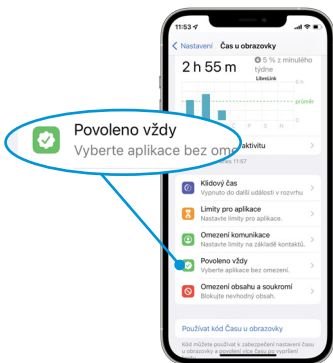

4 Rolujte dolů a přidejte **LibreLink**

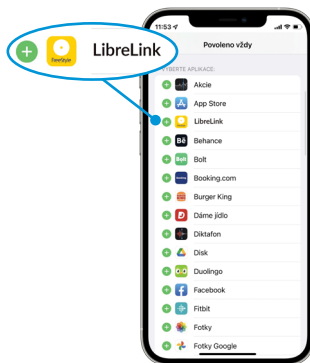

ANDROID

Obsah

- 7 Ověření kompatibility
- 8 Identifikace modelu telefonu a operačního systému
- 9 Stáhněte si a nainstalujte aplikaci
- 11 Vytvoření účtu a přihlášení
- 12 Kontakt na oddělení péče o zákazníky FreeStyle

Ověření kompatibility

Pokyny pro ověření kompatibility telefonu a operačního systému (OS) a podrobný průvodce ke stažení aplikace FreeStyle LibreLink.

Ověřte si kompatibilitu telefonu a operačního systému

Oblíbená mobilní zařízení a operační systémy (OS) jsou pravidelně testovány, aby se vyhodnotila kvalita propojení přes NFC a Bluetooth a kompatibilita aplikací se snímači. Před instalací nové verze operačního systému do telefonu nebo před použitím aplikace s novým telefonem doporučujeme zkontrolovat průvodce kompatibilitou mobilních zařízení a operačních systémů.

Více informací o aplikaci a instruktážní video najdete na freestylelibre.cz/produkty/freestyle-librelink


Pro rychlý přístup na webovou stránku naskenujte QR kód:




Průvodce kompatibilitou chytrých telefonů:

Identifikace modelu telefonu a operačního systému

1 Klepněte na **Nastavení**

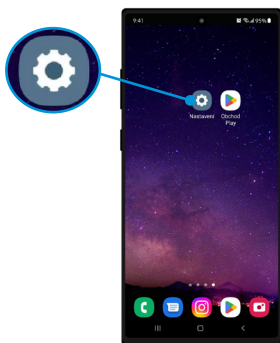


2 Klepněte na **O telefonu** nebo **O zařízení**

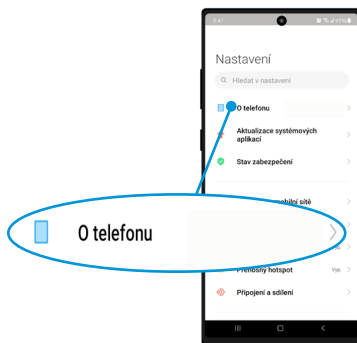

3 Najděte **Jméno modelu**



4 Najděte **Verzi Android**

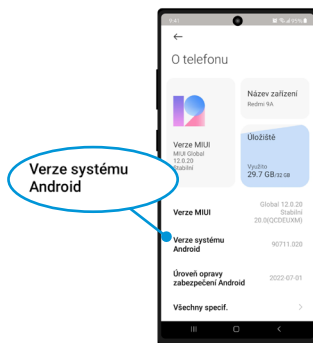

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci


Aplikace FreeStyle LibreLink je k dispozici v obchodě Google Play




1 Klepněte na ikonu **Obchod Play** na domovské obrazovce

Pokud nejste přihlášení ke svému účtu Google, budete vyzváni, abyste:


- zadali e-mail nebo telefonní číslo účtu Google a klepli na položku **Další**
- zadali heslo a klepli na **Další**

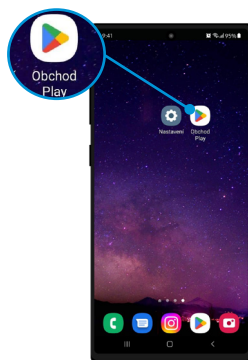


2 Vyhledejte **FreeStyle LibreLink**

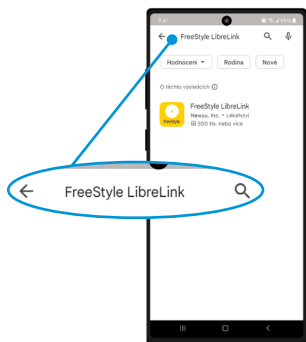


3 Klepněte na **FreeStyle LibreLink**

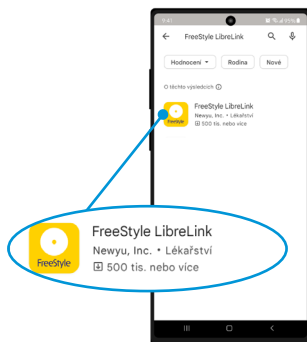

- 4 Klepněte na **Instalovat**
a zahajte stahování

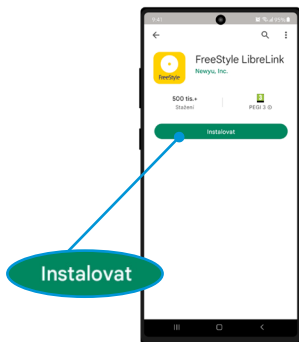

- 5 Klepněte na **Otevřít**
Ikona aplikace se zobrazí na domovské
obrazovce

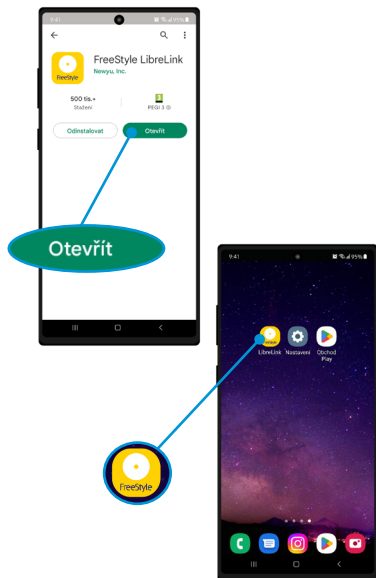

Vytvoření účtu a přihlášení

Abyste mohli aplikaci využívat je potřeba se přihlásit nebo vytvořit účet


Pokud již využíváte cloudovou platformu **LibreView**, přihlašovací údaje do mobilní aplikace FreeStyle LibreLink jsou stejné jako do LibreView

Máte účet LibreView?
Klikněte na **Přihlásit se**

Nemáte účet?
Klikněte na **Začněte hned**

Přihlásit se

ZAČNĚTE HNED

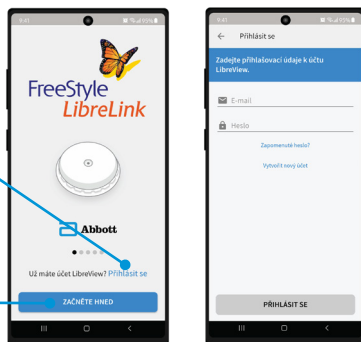

1 Zadejte svou zemi

2 Vyplňte osobní údaje

3 Vyplňte e-mail a heslo



LibreView je zabezpečená cloudová platforma, která zajišťuje, že jsou Vaše data bezpečně uložena. Systém poskytuje pohodlný, srozumitelný a snadný způsob zobrazení a sdílení údajů o glukóze, což pomáhá zlepšovat komunikaci s vašimi zdravotníky.

Potřebujete pomoci?

Kontaktujte tým zákaznické linky FreeStyle Libre na:



Tým zákaznické linky **800 189 564**

Dostupný 5 dní v týdnu od 8:00 do 16:00, mimo víkendy a státní svátky



Další tipy a informace o produktech najdete na [FreeStyleLibre.cz](https://www.freesstylelibre.cz)



Youtube: [Freestyle Česká republika](#)

Mějte cukrovku spolehlivě pod kontrolou

Jednoduše vědět víc



FreeStyle
LibreLink



life. to the fullest.®

Abbott

Aplikace FreeStyle LibreLink a Systém pro okamžité monitorování glukózy FreeStyle Libre (Senzor) jsou zdravotnickými prostředky. Číslo notifikované osoby: 2797. **Čtěte pečlivě uživatelskou příručku a informace o bezpečném používání.** Aplikace FreeStyle LibreLink se používá společně s kompatibilním senzorem FreeStyle Libre pro okamžité monitorování glukózy, je indikována pro měření hladiny glukózy v tkáňovém moku u osob s diabetem mellitus (ve věku od 4 let), včetně těhotných žen. Aplikace a senzor mají sloužit jako náhrada za měření glykémie při samostatné léčbě diabetu, včetně dávkování inzulínu. Indikace pro děti (věk 4–12) je omezena na děti pod dohledem pečovatele ve věku minimálně 18 let. Aplikace FreeStyle LibreLink je kompatibilní pouze s určitými mobilními zařízeními a operačními systémy. Použití Aplikace FreeStyle LibreLink vyžaduje registraci u LibreView. **Výstraha:** Pacienti by se měli vždy nejdříve poradit se svým lékařem, než provedou jakoukoliv zdravotní interpretaci a úpravu léčby na základě informací z měření. Používáte-li Aplikaci FreeStyle LibreLink, musíte mít také přístup k systému monitorování glukózy v krvi, protože aplikace jej neposkytuje. Aplikace nevydává žádné alarmy.

© 2022 Abbott. ADC-64570 v2.0 11/22 FreeStyle, Libre a související obchodní značky jsou značky společnosti Abbott.